

# INSTRUCCIONES DE APERTURA CAJAS Y BLISTER DE PRODUCTOS ESTÉRILES ROOTT



Asegúrese de que el paquete no esté dañado antes de usarlo.  
No lo use si el paquete está dañado.

El color rojo de la etiqueta de radiación gamma indica que el paquete ha pasado el proceso de esterilización. La misma pegatina protege el paquete para que no se abra desde la parte inferior.



GAMMA RADIATION  
STERILIZATION INDICATOR  
RED IS  $\gamma$  EXPOSED

① Toma una caja en tu mano



② Abrir la caja: empujar y tirar para abrir



③ Sacar la ampolla





④ Toma la ampolla en tu mano





⑤ Abre el blister



⑥ El blister está abierto, saque el implante.

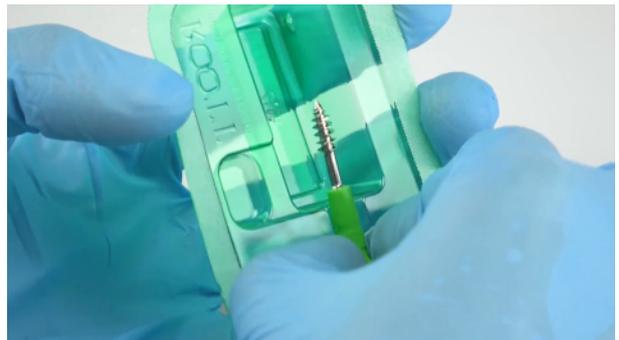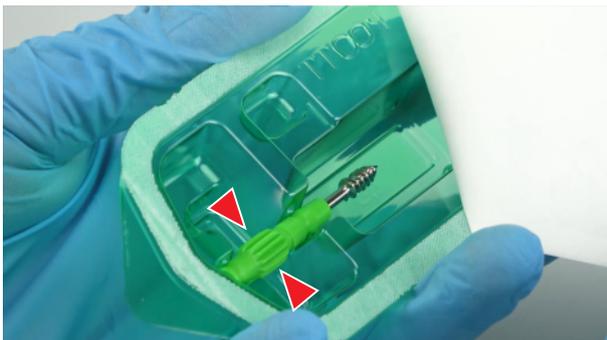

Sostenga con los dedos la parte verde como se muestra.

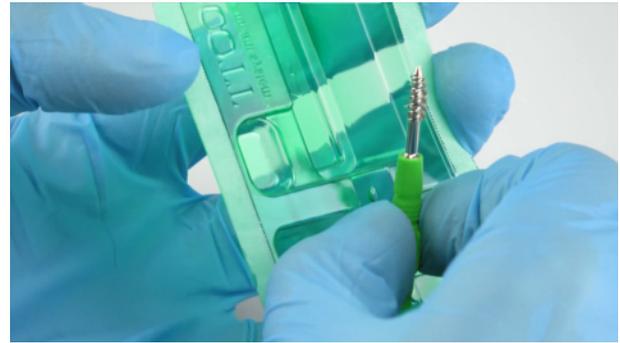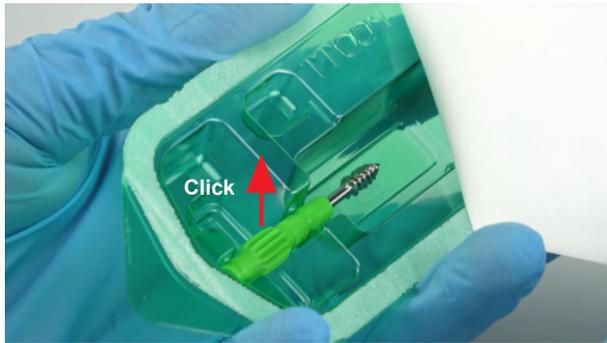

Tire hacia arriba sosteniendo con cuidado la parte verde.



7 Inserte inmediatamente el implante en el sentido de las agujas del reloj en el orificio preparado, sujetando solo la parte verde. Prepare el agujero antes de abrir la caja.



⑧ Retire el soporte verde de lado a lado en cámara lenta y levántelo.



Para los siguientes pasos, lea “ *Placement protocol* ”.